

# SCELTA DELLE MASCHERINE PROTETTIVE

GOCCIOLINE: 5 µm

VIRUS COVID-19: 0.1÷0.2 µm

Tipologia	Sistema di filtrazione	Protezione verso l'esterno	Protezione dall'esterno
MASCHERINA CHIRURGICA 		Trattiene le particelle emesse da chi le indossa evitando che possano arrivare a contatto con altre persone. Utile per fermare il contagio dagli asintomatici	Nessuna
MASCHERINA FFP1 	Protezione pari ad almeno l'80% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0.6 µm	Trattiene le particelle emesse da chi le indossa evitando che possano arrivare a contatto con altre persone. Utile per fermare il contagio dagli asintomatici	Parziale
MASCHERINA FFP2 	Protezione pari almeno 94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0.6 µm	Trattiene le particelle emesse da chi le indossa evitando che possano arrivare a contatto con altre persone. Utile per fermare il contagio dagli asintomatici	Efficace
MASCHERINA FFP3 	Protezione pari almeno al 99% dalle particelle con dimensioni fino a 0.6 µm,	Trattiene le particelle emesse da chi le indossa evitando che possano arrivare a contatto con altre persone. Utile per fermare il contagio dagli asintomatici	Efficace

## Come mettere la mascherina

- Prima di indossarla bisogna lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
- Indossare la mascherina coprendo bene bocca e naso
- Assicurarci che la mascherina aderisca correttamente al volto

## Come togliere la mascherina

- Prenderla dall'elastico, evitando di toccare la parte anteriore

- Inserirla in un sacchetto chiuso prima di buttarla e lavare di nuovo le mani

## Quando cambiarle

- Verificare quanto raccomandato nel foglio delle istruzioni allegato alla confezione
- Cambiare la mascherina comunque quando diventa umida. Quella tolta non deve essere riutilizzata e deve essere sostituita con una nuova.